



De rollator

Waaraan moet een veilige en stabiele rollator voldoen

De technische afstelling. Deze moet regelmatig worden gecontroleerd door een erkend bedrijf in hulpmiddelen

1. Alle onderdelen moeten worden gecontroleerd of ze goed vastzitten en kunnen bewegen als dat nodig is.
2. De remmen moeten goed zijn afgesteld en soepel kunnen worden bediend.
3. De handsteunen van de rollator moeten ter hoogte van de polsen worden afgesteld. Dit zorgt ervoor dat u rechtop blijft lopen

Veiligheidsaspecten:

Bij het lopen is het raadzaam om rechtop te lopen en naar voren te kijken. Het lichaam blijven tijdens het lopen zoveel mogelijk tussen de achterwielen van de rollator.

Het remsysteem



Omgekeerde rem: handle inknijpen om te lopen, weer los laten is remmen
Normale rem: handle inknijpen om te remmen.

De sleeprem



De sleeprem, wanneer de rollator moet worden afgeremd

De banden



Zachte luchtbanden of Harde rubberen banden

Het opstaan uit een stoel op te lopen met een rollator

1. De rollator voor de stoel plaatsen en op de parkeerrem zetten
2. De voeten beetje uit elkaar en dichtbij de stoel plaatsen
3. Met behulp van de armsteunen van de stoel opstaan, niet trekken aan de rollator.
Druk uzelf met de handen armen omhoog terwijl u de benen als steun gebruikt
4. Blijf dicht bij de rollator staan terwijl u omhoog komt in een volledig staande positie.
5. Controleer of u stabiel en evenwichtig staat voordat u de remmen deblokkeert en gaat lopen

Het gaan zitten in een stoel vanuit een rollator

1. Loop met de rollator tot vlak bij de stoel
2. Draai de rollator linksom of rechtsom en loop langzaam stapje voor stapje achteruit totdat de onderbenen de stoel raken
3. Zet de rollator op de parkeerrem en zoek eerst met één hand de armsteun van de stoel, de andere hand blijft nog de rollator vasthouden
4. Zodra u het contact met de armsteun voelt, buig dan pas de knieën en laat u langzaam zakken in de stoel, het bekken naar achteren bewegend.
5. Leun niet te ver naar voren of naar achteren, het helpt om uw balans te behouden

Let op: ná het lopen weer gaan zitten kan door vermoeidheid een extra valrisico zijn!


Samenvatting

- Zorg voor een goede afstelling van de hoogte van de handvatten
- Zorg voor een regelmatige controle van het remsysteem van de rollator
- Gebruik altijd de (parkeer)rem wanneer u stopt, dit voorkomt wegglijden
- Draag stevige schoenen met voldoende grip
- Oefen eerst samen met uw partner of begeleider het opstaan en weer gaan zitten in combinatie met de rollator om vallen te voorkomen

De Rollz rollators



productondersteuning

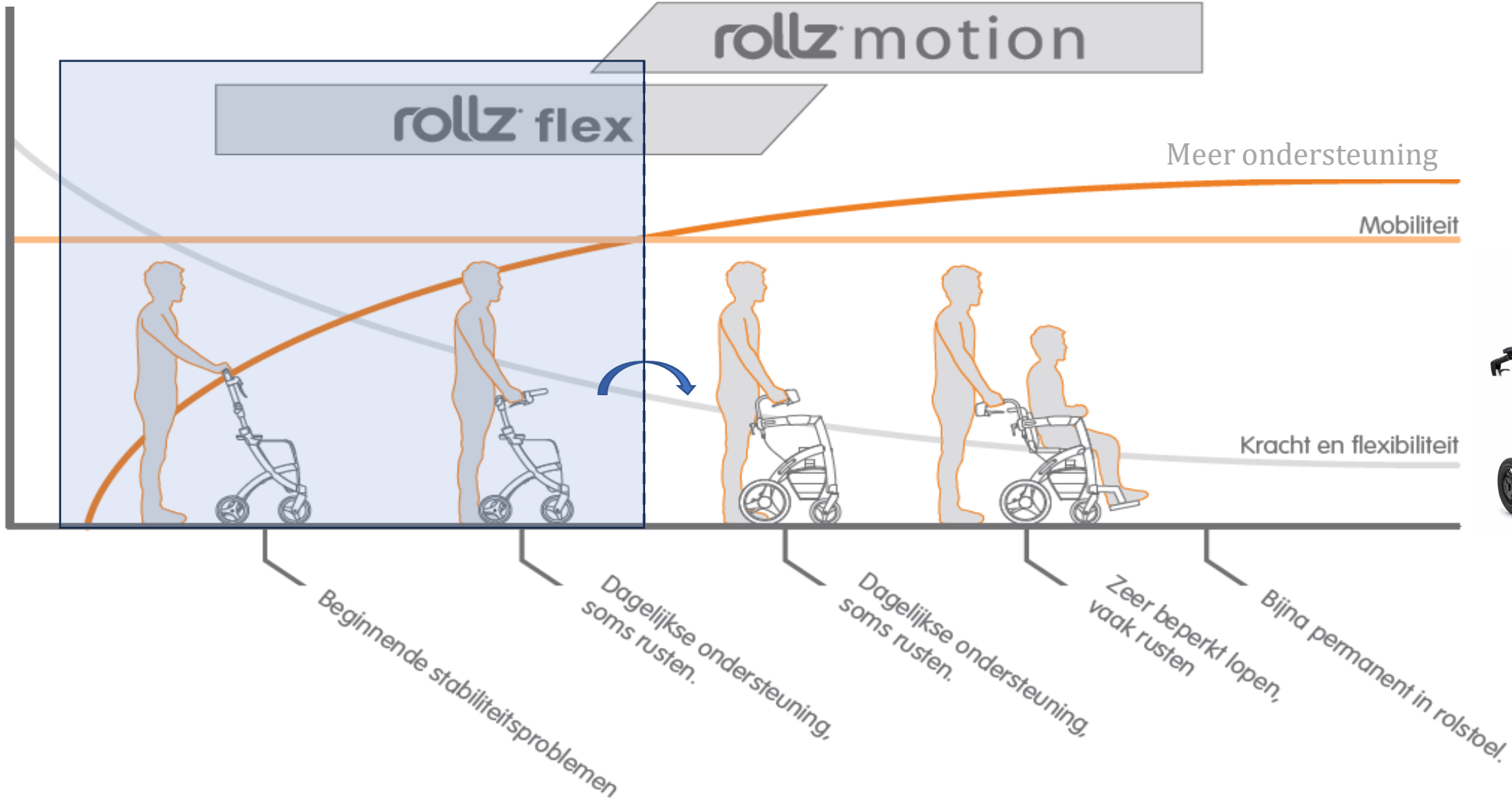

De Rollz Flex



Lichtgewicht rollator
met boodschappentas

Extra Accessoires:



Dienblad




Stokhouder



Rugsteun


Het Rollz Modulair Concept

Rollz Motion

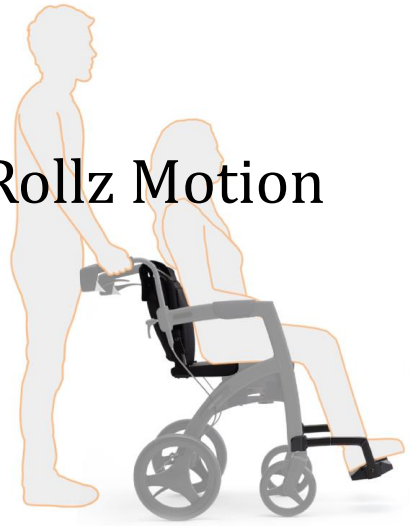

Rollator and transport chair in one

Rollz Motion Rhythm

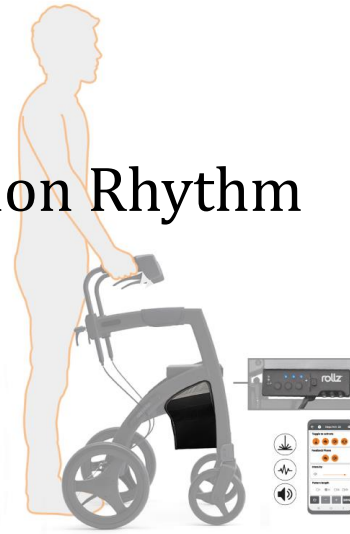

Neurologic rollator



Rollz Motion Performance



Rollator and transport chair with air tires

Rollz Motion Electric




Electric wheelchair



Rollz Motion
Modulair
Rollator à rolstoel



Rollz Motion Electric

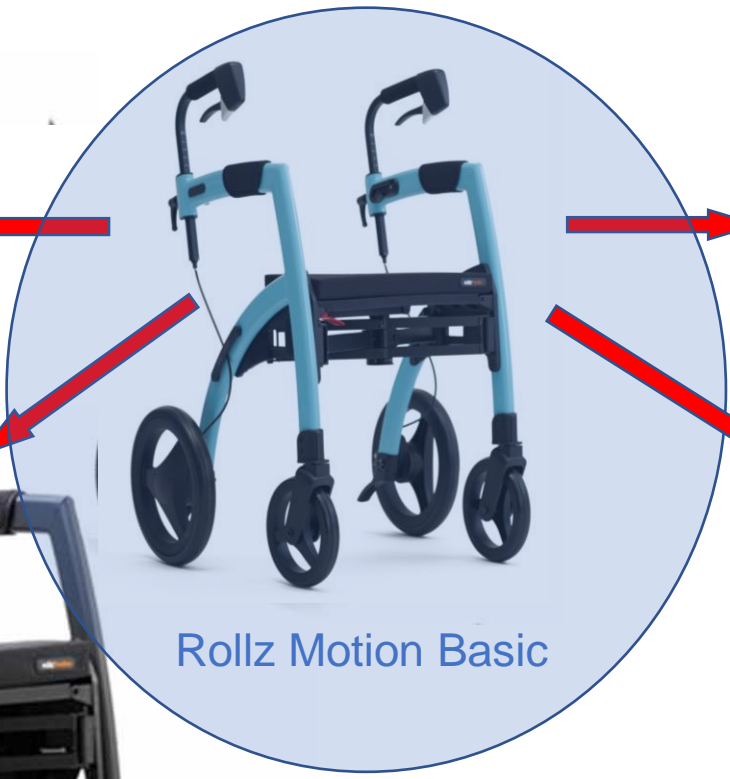

Rollz Motion Basic




Rollz Motion Rhythm



Rollz Motion Performance

productondersteuning

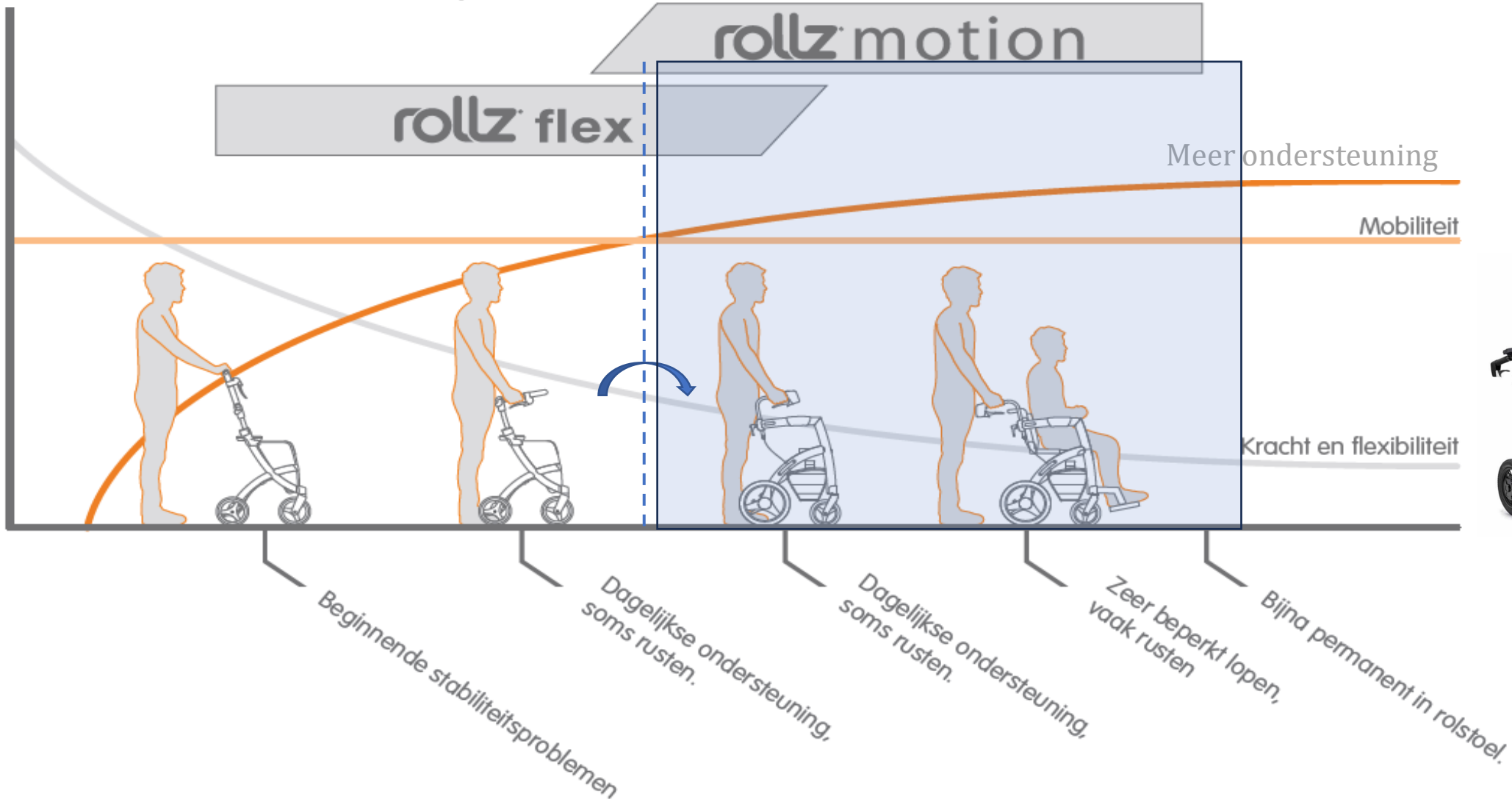

Rollz Motion

De rollator en rolstoel ineen

Specificaties:

Rollz Motion Rollator : 10,6 kg

Rollz rolstoelpakket : 3,7 kg

Max. belasting : 125 kg

Min. en max. gebruikerslengte standaard versie : 1.60-1.90 m

Min. en max. gebruikerslengte lage versie : 1.50-1.85 m

Afmetingen:

Uitgeklapt (H x L x B) : 86-102 x 63 x 63 cm

Ingeklapt (H x L x B) : 86-102 x 63 x 29 cm

Zitbreedte Rollz rolstoel: 42 cm

Zitdiepte Rollz rolstoel: 40 cm



Binnenshuis lopen met een rollator

1. Oefen eerst het lopen met een rollator met uw partner of een begeleider
2. Gebruik altijd de (parkeer)rem als u stopt, dit voorkomt wegglijden en vallen
3. Blijf zo vaak mogelijk naar voren kijken, niet naar beneden, hierdoor loopt u meer rechtop
4. Maak langzame en bewuste stappen om stabiliteit en evenwicht te behouden tijdens het lopen
5. Zorg voor een veilige situatie in huis:
 - Verwijder losse vloerdelen indien die er zijn
 - Maak genoeg ruimte om te lopen en te draaien met de rollator

Buiten lopen met een rollator

1. Kies stevige schoenen uit voor voldoende grip op verschillende ondergronden
2. Begin met het lopen op vlak terrein in een rustige omgeving en vermijd de stoepranden en oneffen paden
3. Overweeg bij de 1^{ste} keer om uw partner/begeleider mee te vragen om samen buiten te oefenen
4. als het goed gaat kunt u de volgende keer de stoepranden gaan oefenen: benader deze recht en gebruik de remmen van de rollator.
5. Pas uw tempo aan op uw eigen vermogen, niet op uw omgeving.
6. Wees extra voorzichtig bij het draaien met de rollator, stapje voor stapje
7. Geef tijdig aan wanneer u vermoeid raakt, zet de rollator dan op de parkeerrem en ga zitten op de zitsteun
8. Indien het helemaal niet meer gaat, kan uw partner of begeleider de rollator omzetten naar een transportrolstoel om verder te worden geduwd (alleen bij Rollz Motion rollator)

De Parkinson rollator



Welke Parkinson rollators worden op de markt gepresenteerd, en wat zijn de verschillen?



Fellow Roll



uMotion



Gemino 30



Rollz Motion Rhythm

Parkinson Rollator	Omgekeerd Remsysteem	Standaard Remsysteem	Eenhandige rem	Tweehandige rem	Sleeprem	Laser lijn	Metronoom	Vibratie in handvat	Onderarm schalen
Gemino 30	X	X		X	X	X			X
uMotion	X		X		X	X			
Fellow Roll		X		X	X	X	X		X
Rollz Rhythm	X*	X		X	X	X	X	X	
									Bron: 2023

* Op aanvraag leverbaar

De Rollz Motion 'ombouwen' tot Rhythm

Elke Rollz Motion kan omgebouwd worden tot een Rollz Motion Rhythm, door

1. een Rhythm module toe te voegen en
2. de handgrepen te vervangen.



Rollz Rhythm

Een stabiele rollator met drie instelbare signalen

De Rollz Motion Rhythm is een zeer wendbare en stabiele rollator met hoge kwaliteit remmen. De grote wielen zorgen voor rijcomfort en deze is in te klappen tot een compact pakket.


Meerdere keuzes in signalen - instelbaar via de Rollz App of manueel aan de rolstoel - ondersteunen u bij het opstarten of het aanhouden van een loopritme. Vooral Parkinson patiënten ondervinden voordelen van deze producteigenschappen en instelbare signalen.



Lichtsignaal

Trillingen in handvaten

Geluid

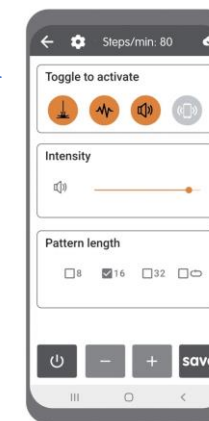


Persoonlijke instellingen

Specifiek voor iedere gebruiker

Naast het aanpassen van de snelheid en de combinatie van de cues, wat ook op de Parkinson rollator zelf kan worden gedaan, kun je op de Rollz App ook de intensiteit, duur en voorspelbaarheid instellen. Deze variabelen kunnen gemakkelijk door de gebruiker worden aangepast.

De gebruiker kan ervoor kiezen de instellingen aan te passen op basis van zijn of haar eigen ervaring of in lijn met het revalidatieprogramma. Als er een therapeut bij is betrokken, kunnen de instellingen worden aangepast aan het trainingsschema.

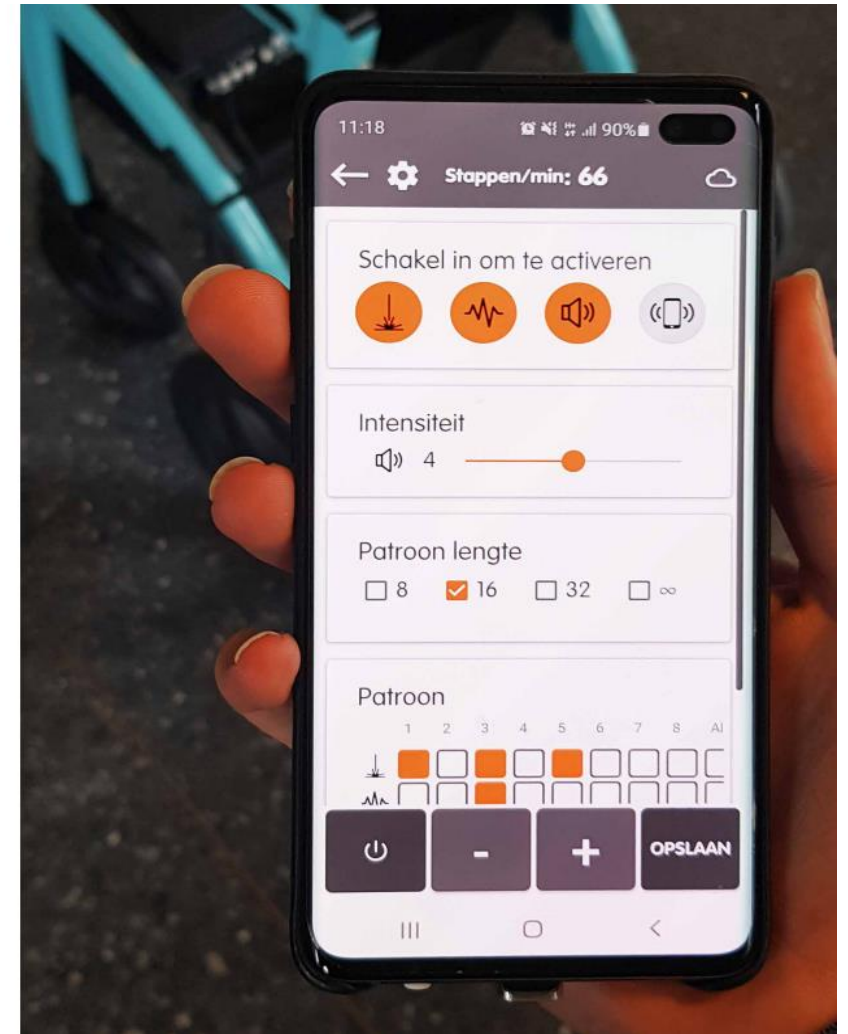

De Rollz Electric rollator



Rollz Motion Electric: 3-in-1 rollator




- Gewicht 25,5 Kg
- Rolstoelpakket 3,4 Kg
- Max. draagkracht 100Kg
- Bereik +/- 15 Km op volle accu
- Max. snelheid 6 Km/uur
- WA verzekering verplicht, geel kentekenplaatje niet verplicht
- Garantie:
 - 2 jaar remmen/wielen
 - 5 jaar frame
 - 18 maanden accu

De toekomst rollator





Innovatieve ontwikkelingen voor de toekomst

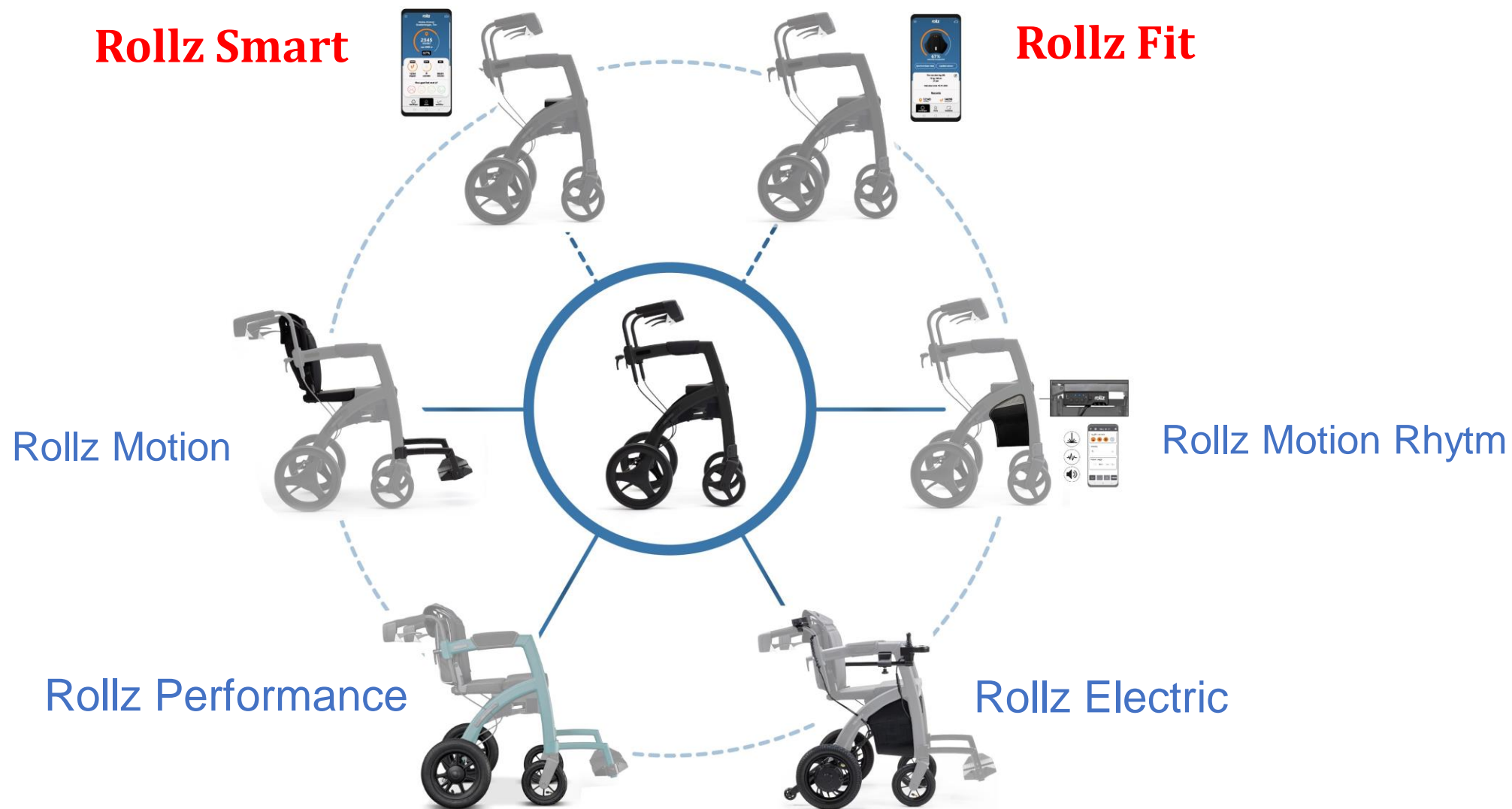


Rollz Fit

Activiteit App in wieldop

2024

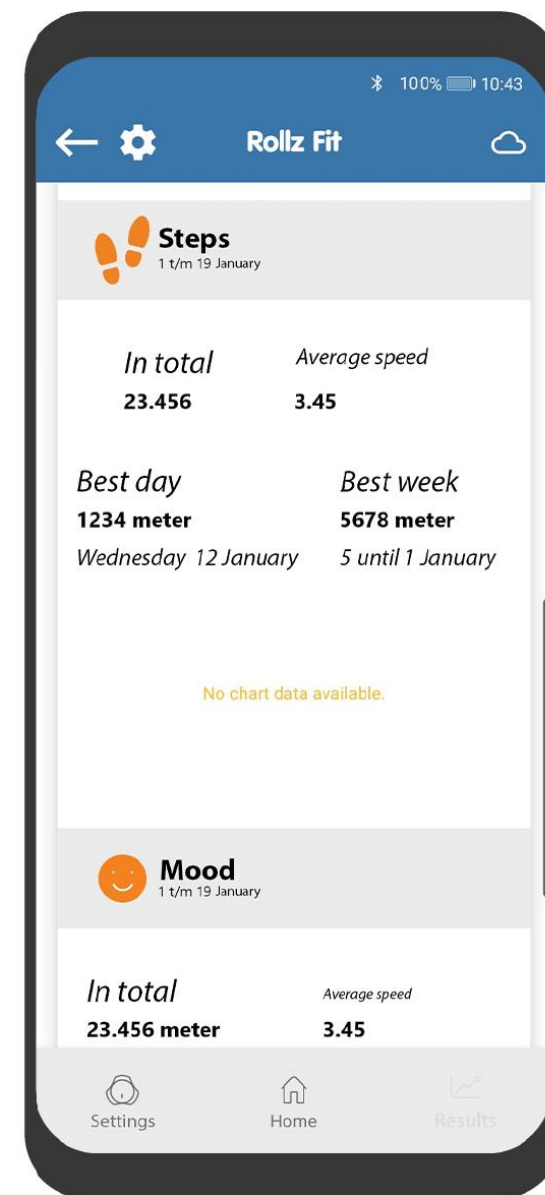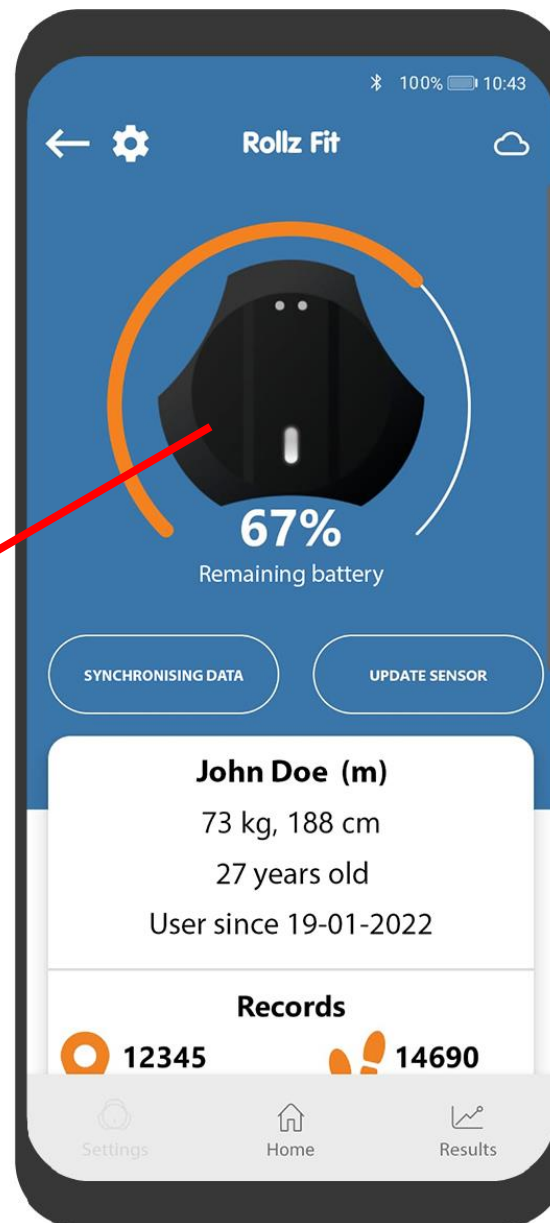


Rollz Motion Smart

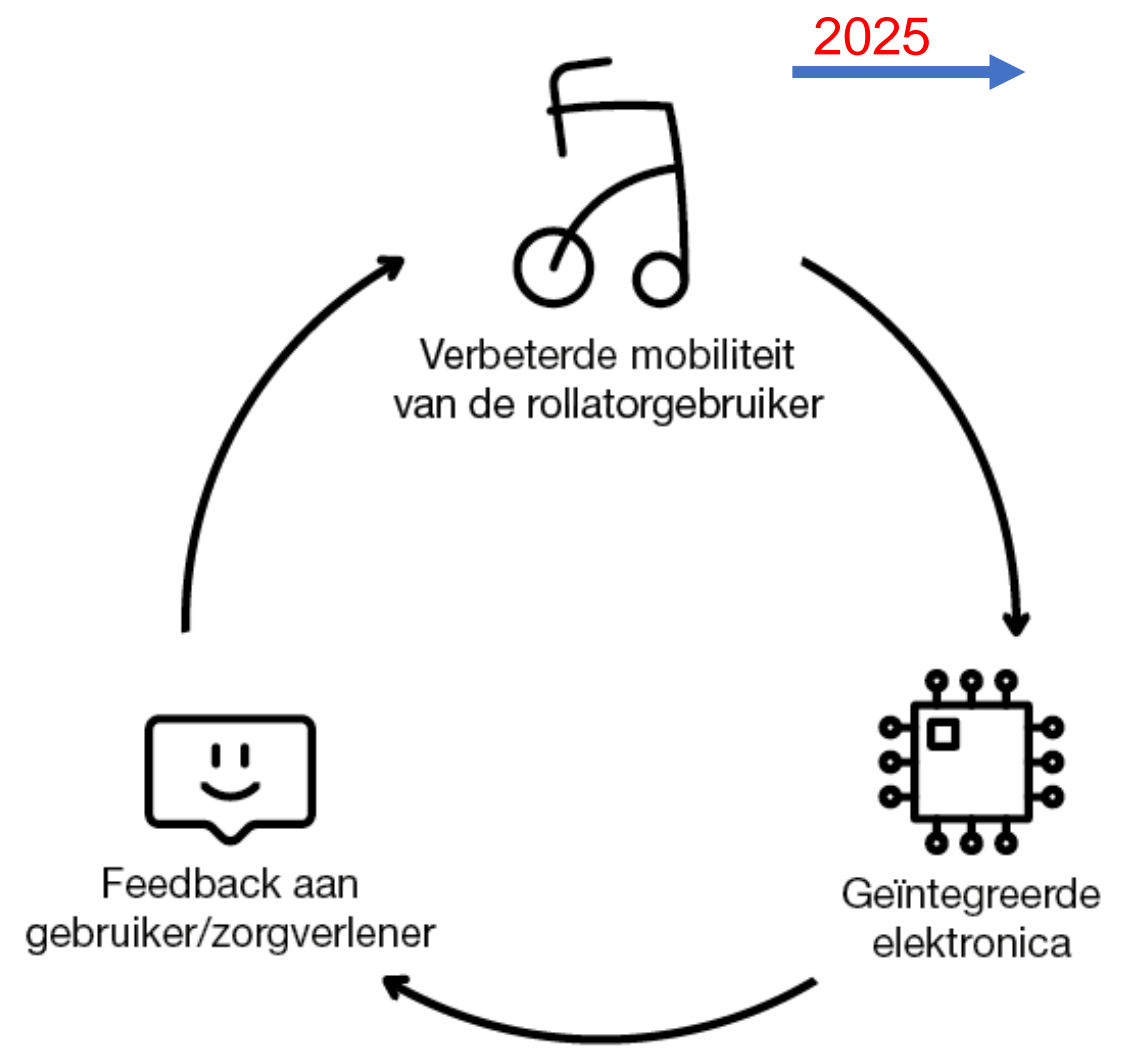

Met het slimme Rollz systeem wordt er live een loopanalyse uitgevoerd door middel van gevalideerde sensoren onder de zitting. Informatie over gangbeeldparameters worden weergegeven in een app op een tablet.

Toekomstige mogelijkheid voor ondersteuning

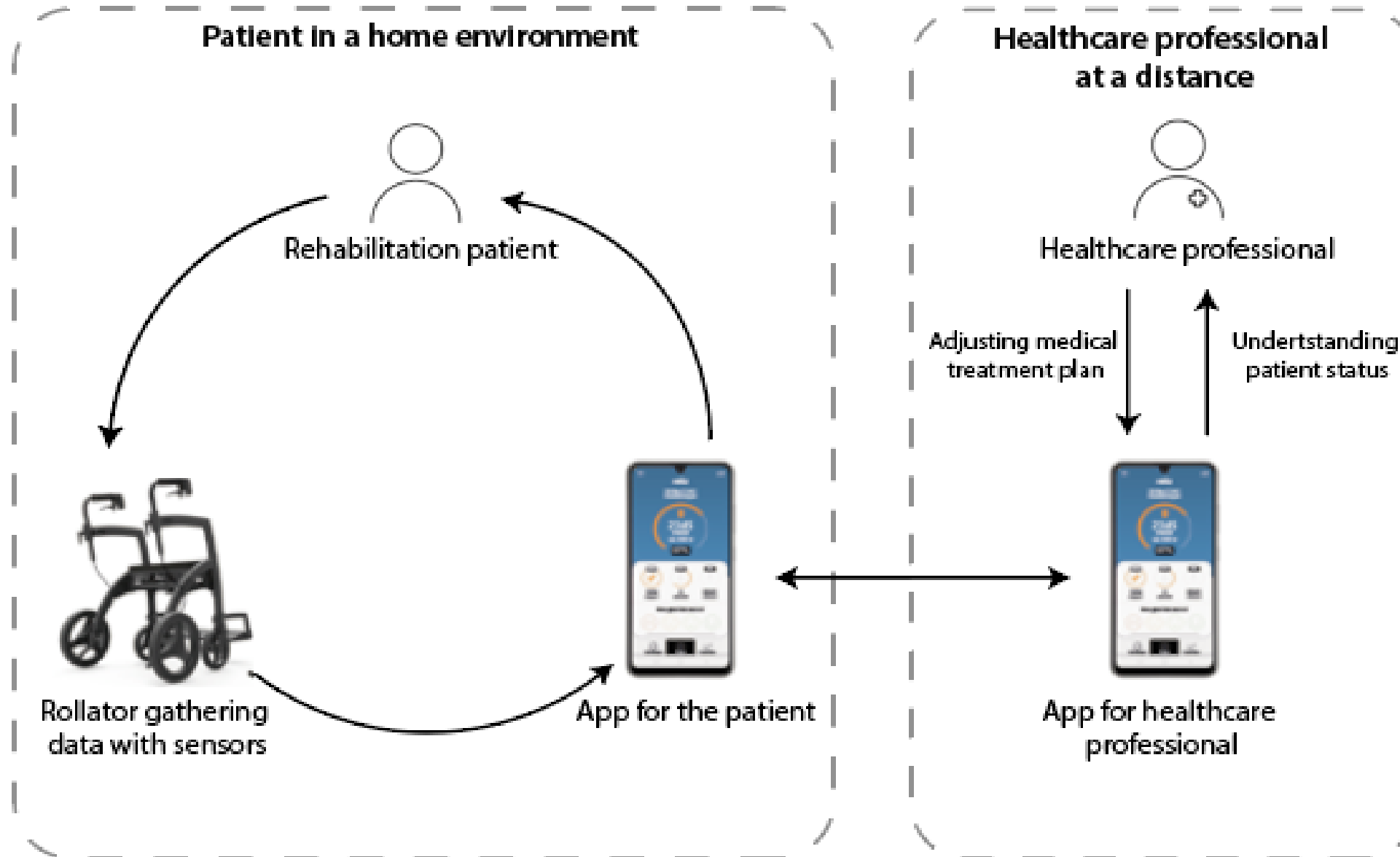



rollz

Rotterdamseweg 402M, 2629HH Delft,
The Netherlands.

+31 20 362 2010, info@rollz.com
www.rollz.com



Pauze



WWW.ROLLZ.COM